


1. Scegli il sito di applicazione del sensore

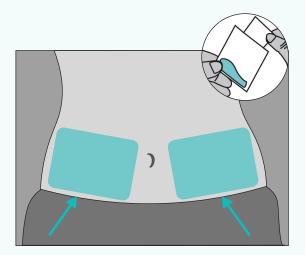

Scegli un sito di posizionamento del sensore sull'addome.


Pulisci il sito con salviettine imbevute di alcol e lascia asciugare completamente l'area.

- 5 cm di distanza dall'ombelico.
- 5 cm di distanza dal sito di iniezione dell'insulina.
- Evita siti di coaguli grassi, tatuaggi, cicatrici.
- Radi il sito se dovesse essere presente peluria eccessiva.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o scaduta!


Applicazione del Sensore

2. Rimuovi le coperture protettive

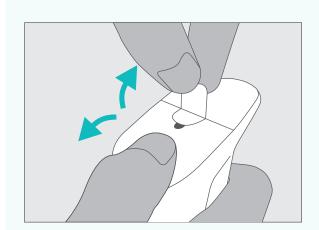

Capovolgi l'applicatore con il sensore integrato e rimuovi i due rivestimenti protettivi.

3. Posiziona il sensore

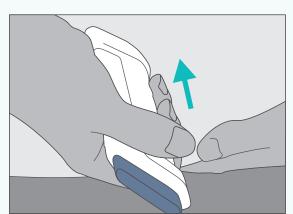


Posiziona il sensore orizzontalmente sull'addome e premi saldamente l'applicatore contro la pelle.

Applicazione del Sensore

Applicazione del Sensore

4. Rimuovi il blocco di sicurezza

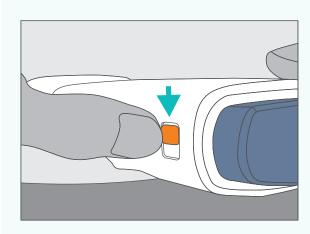









Mantieni saldamente l'applicatore in posizione, fai scorrere il pulsante di sicurezza in posizione da "bloccato" a "sbloccato".

Applicazione del Sensore


5. Premi il pulsante superiore

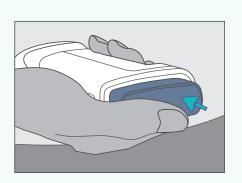

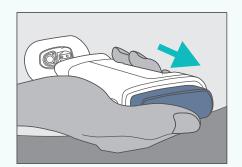

- Premi il pulsante ubicato nella parte superiore dell'applicatore.
- Se il pulsante è stato premuto correttamente, potrai sentire un "click".
- In fine, potrai rimuovere l'applicatore monouso allontanandolo nel verso di inserimento. Applicazione del Sensore

6. Premi il cerotto adesivo

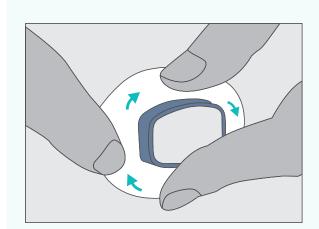


Premi il sensore e fai scorrere le dita intorno al cerotto adesivo per assicurarti che sia saldamente attaccato alla pelle.


Applicazione del Sensore

7. Associa il trasmettitore

- Pulisci la parte inferiore del trasmettitore con una salvietta imbevuta di alcol e attendi che si asciughi completamente.
- Controlla il lato a punta
- - e il lato delle 2 fessure.
- Inserisci il lato appuntito nella base del sensore. Premi delicatamente l'altro lato.
- Inserisci i due poli dello strumento di fissaggio-rimozione nei due fori lungo il bordo
- Ruota delicatamente lo strumento nella direzione indicata nell'immagine. Quando sentirai un clic, rimuovi lo strumento.



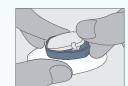

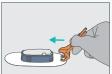






Applicazione del Sensore

1. Rimuovi il sensore e il trasmettitore

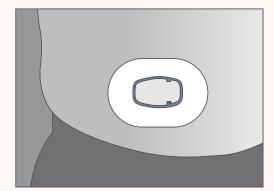


Rimuovi <u>insieme</u>il sensore e il trasmettitore dalla pelle.




Solleva delicatamente il bordo del cerotto adesivo dalla pelle e rimuovi il sensore da un lato all'altro.

Rimozione del sensore

2. Rimuovi il trasmettitore

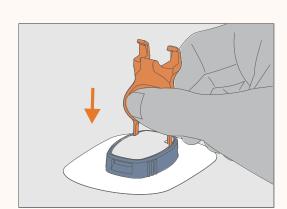

Prendi lo strumento di fissaggio e rimozione e fissalo nel sensore come mostrato nell'immagine.

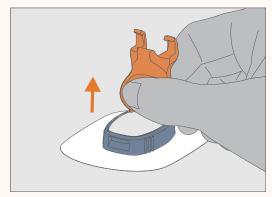

Poi estrarlo per rimuovere il trasmettitore dal sensore.



Il trasmettitore è riutilizzabile. Conservalo con cura.

Rimozione del sensore

3. Pulizia e smaltimento








Pulisci il trasmettitore con una salviettina imbevuta di alcool, riponilo nella confezione se non lo usi, oppure collegalo ad un nuovo sensore per iniziare una nuova sessione.



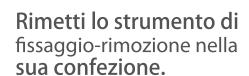

2








Procedi allo smaltimento del sensore utilizzato secondo le normative locali.

Rimozione del sensore

Scansione il QR Code sotto

per scaricare le istruzioni

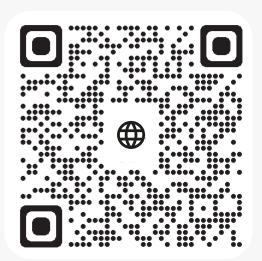

infinovo.com



Informazioni importanti prima di utilizzare il prodotto.

Si prega di consultare attentamente le istruzioni del prodotto prima di utilizzarlo. Le istruzioni contengono informazioni importanti, incluse indicazioni, controindicazioni e avvertimenti.

Per consultare le istruzioni, vai su https://infinovo.com/en/Downloads o contatta il distributore locale.

	Infinovo Medical Co., Ltd 3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400, Jiangsu, China	
EC REP	Llins Service & Consulting GmbH Heinigstrasse 26, 67059 Ludwigshafen, Germany info@llins-service.com	



